

Mobilex Vridsits 278051 och 278052

Användarinformation och Bruksanvisning



Beskrivning:

Mobilex vridsits är ett mjukt lätthanterligt hjälpmedel för såväl människor med rörelsehinder som för de med full rörlighet. Den är till stor hjälp för alla som ofta skall i och ur bilen. Den vridbar sits justerar sig särskilt väl i bilsätet. Den är smidig vid placering i sängen för personer som behöver hjälp från sittande på sängkant till liggande samt omvänt, även om denne är mycket orörlig. Med Mobilex vridsits blir det mindre belastning på knän, höft och rygg tack vare vrideffekten, d.v.s. att vridningen sker i hjälpmedlet och inte i kroppen.

Material och fakta:

Mobilex vridsits består av två mjuka plattor med en slät yta mellan övre och nedre vridplattan, som underlättar vridning vid sittande ta ex in i och ur bil. Den övre delen består av en vadderad kudde med mörkblå yta, tillverkad av mjukt tygmateriel som andas på hela sittytan. Undersidan består av antihalkamateriel för extra säkerhet. Materialet följer formen av sätet som är nedan. (bilsits, stol, fåtölj, säng).

Klarar vikt upp till 100 kg.

Hantering:

Sidan med antihalkamateriel skall vara neråt för att hindra glidning. Brukaren skall sätta sig mitt på skivan.

Obs!

Får ej lämnas på golvet på grund av halkrisk !
Skivorna skall ej tas isär!

Tvättråd:

Tvättas med hand i max 30°C eller torkas av med en fuktig trasa.

Mobilex vridsits bör **inte** användas i våtrum då antihalkamaterialet på undersidan kan bli halt vid kontakt med vatten.

Obs!

Använd ej klor eller sköljmedel då det försämrar friktionen och därigenom hjälpmedlets funktion.

Art-Nr.	Beskrivning	Vikt
27 80 51	vridsits diameter 45 cm	ca. 290 g
27 80 52	vridsits diameter 50 cm	ca. 340 g