

Fast toiletsædeforhøjer med klapbare armlæn

Montage- og brugervejledning for 301701



Fabrikant:

MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

www.mobilex.dk

1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for en siddeforhøjelse og/eller støtte under toiletbesøg.

Ved spørgsmål bedes de henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Placer ikke produktet udenfor.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Den faste toiletsædeforhøjler kan enkelt placeres direkte på toilettet. Den fastgøres på toiletkummen med justerbare beslag. Siddehøjden kan justeres i 3 højder ved at flytte højdereguleringen på siden af sædet. De stabile armlæn giver støtte til brugeren og kan svinges op for at tillade forflytning. Armlænet kan stå i opret position og kan fjernes uden brug af værktøj. Sædet kan fjernes fra toilettet for rengøring.

Montagebeskrivelse

Højde regulering

- Fjern plast dækkapperne på siden af sædet.
- Løsn boltene og placer støtte stangen i den ønskede højde.
- Fastgør boltene.
- Støttestangen skal placeres i samme højde i begge ender.
- Placer plast dækkapperne igen.

Fastgør sædet til toiletkummen

- Fjern det eksisterende toiletlæg og erstat det med det fastmonterede sæde ved stikke de 2 gevindstænger i hullerne på den bageste del af toiletkummen.
- Fastgør sædet ved at skrue de 2 plastbøsninger helt fast.
- Kontroller at sædet er helt stabilt før anvendelse.

Transport beskrivelse

Hvis nødvendigt kan det faste sæde enkelt aftages for transport.

Tilbehør


Det faste toiletsæde har ikke noget tilbehør.

4. Tekniske data

Toiletsædeforhøjer	301701
Total bredde	51 cm
Total længde	49,5 cm
Bredde mellem armlænene	49 cm
Mulige siddehøjder	8 cm, 12 cm, 16 cm
Total vægt	6,2 kg
Max. belastning	120 kg
Pakkedimensioner (L x B x H)	59 x 52 x 26 cm

Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af produktet

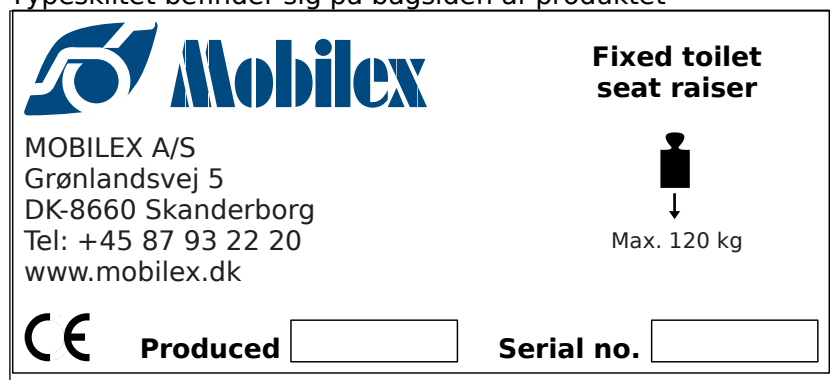

Billede af typeskiltet

5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Sædet er ikke horisontalt	Stængerne til højderegulering er ikke i samme position for og bag	Placer stængerne i samme højde
Sædet er ikke stabilt.	Plastbøsningerne under toiletkummen er ikke fastgjort	Skru plastbøsningerne helt fast

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Fast toiletsædeforhøjer 301701

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr.**

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S



Skanderborg, den 2/2 - 2006

.....
underskrift