

## Foldbar toilet- og badestol varenr. 302011

### Montage- og brugervejledning



Fabrikant:  
**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark  
www.mobilex.dk

## 1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

### Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for støtte under toiletbesøg. Produktet kan også anvendes som badestol. Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilexdk

## 2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag
- Produktet må ikke anvendes til at stå på.
- Placer ikke produktet udenfor.

## 3. Beskrivelse


### Produktbeskrivelse

Den foldbare toiletstol har alle de normale funktioner som en standard toilet stol, og er specielt udviklet til enkel og pladsbesparende transport og opmagasinering. Den er designet til brugere der har brug for siddestøtte under toiletbesøg og bad. Produktet er fremstillet af aluminium og er derfor korrosionsbestandig. Der skal ikke anvendes værktøj til samling.

### Montagebeskrivelse

#### a) Opstilling af stolen

1. Drej siderne (A) og (B) fremad, således at der er 90 graders vinkel mellem dem og bagsiden.
2. Placer røret fra siddeenheden (C) ind i beslagene (D), således at samlingen er stabil og låst.
3. Skub spanden ind over skinnerne under siddeenheden fra forsiden af stolen..
4. Læg låget ned hvis det er løftet.

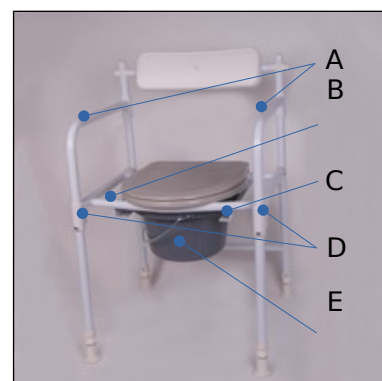

## b) Justering af siddehøjden (benenes længde)

Siddehøjden skal justeres til brugeren. Siddehøjden er korrekt, når brugeren sidder på stolen og begge fødder rører gulvet samtidig med at lårene er vandrette.

1. Træk låseclip'en (A) ud af stolens ben..
2. Juster den teleskopiske del af benet til den ønskede længde..
3. Skub clip'en (A) ind i hullet (B).
4. Gentag proceduren for de andre ben.



VIGTIGT! Juster ikke stolens højde, medens der sidder nogen på den.

## Transportbeskrivelse

Stolen kan let foldes for transport.

## Tilbehør


Den foldbare toiletstol har ikke noget tilbehør

## 4. Tekniske Data:

Foldbar toiletstol	Varenr. 302011
Total højde	80 - 90 cm
Siddehøjde (justerbar i trin af 2,5 cm)	46 - 56 cm i 4 trin
Total bredde	55,5 cm
Total dybde	52 cm
Vægt	4,85 kg
Max belastning	100 kg
Pakke dimensioner	55,5 x 17 x 80 cm (L x B x H)

## Produkt label

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af produktet

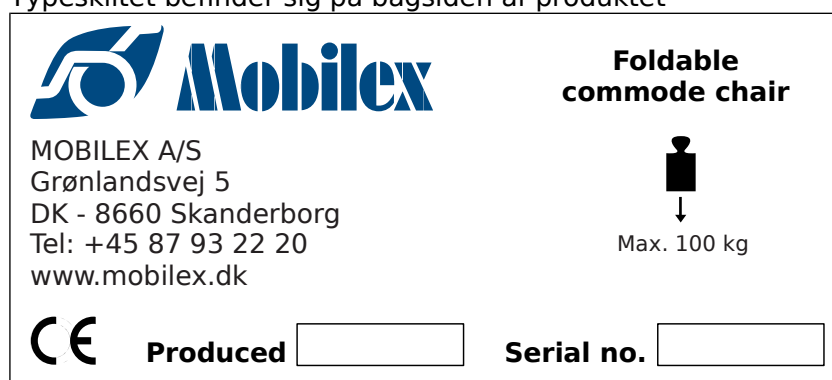

Billede af typeskiltet

## 5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

## 6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Toiletstolen er ikke stabil	Benene er justerede til forskellige længder	Juster alle benene til samme længde
Sædet er ikke vandret	Sædet er ikke låst korrekt i beslagene	Kontroller at sædet er placeret korrekt og låst til beslagene i siderammerne.

## 7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## 9. Konformitetserklæring


Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

### **Foldbar toiletstøtte varenr. 302011**

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr,**

Lars Nygaard  
Adm. Direktør  
Mobilex A/S

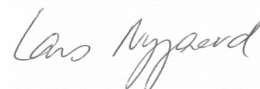

Skanderborg, den 12.01.2010

.....  
Underskrift