

Aqua badekarsindsats varenr. 302012

Montage- og brugervejledning



Note: Badekarsindsatsen leveres uden ryglæn. Ryglæn kan tilkøbes særskilt(varenr. 302012)



Fabrikant:
MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for støtte i forbindelse med at komme i hhv. forlade badekarret samt i forbindelse med badet. Produktet giver brugeren mulighed for at komme i bad med eller uden assistance fra en hjælper. Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Denmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren, og produktet må ikke længere anvendes.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet, herunder max. Belastning.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes i traditionelle badekar med lige høje kanter. Sørg for at bredden er korrekt justeret før produktet tages i brug, og at de 4 arme ligger fladt og stabilt.
- Det anbefales at en hjælper assisterer ved anvendelse af produktet.
- Badesædet må ikke anvendes til at stå på.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Badekarsædet består af en ramme lavet af aluminium med et blødt PUR-sæde. Som tilbehør kan monteres et ryglæn. De 4 arme er forsynet med beskyttende gummi dupsko der skal placeres på badekarrets sider.

Montageanvisning

Badekarsædet leveres næsten klar til brug. Før brug monteres PUR-sædet på rammen. Længden af armene justeres ved at trække clipsene ud, justere og isætte dem igen. Armene skal justeres til samme længde i begge sider, og justeringen skal foretages således at de 4 gummi dupsko hviler sikkert på badekarrets kant.

Hvis der er medkøbt et ryglæn monteres dette også ved hjælp af 4 clips. Det er nemmest at lægges badesædet på hovedet før montage af ryggen.

Transportbeskrivelse

Badekarsædet kan enkelt medbringes og anvendes andre steder.

Tilbehør


Der kan leveres et ryglæn som tilbehør.

4. Tekniske data

| Mobilex Badekarsæde | 302012 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Total bredde | 75 - 91 cm |
| Total dybde | 42 cm |
| Total højde | 23 cm |
| Sædebredde | 41 cm |
| Sædedybde | 34 cm |
| Indvendig badekarbredde | 62 - 78 cm |
| Vægt | 2,7 kg |
| Max belastning | 150 kg |
| Pakke dimension (2 stk) (L x B x H) | 77 cm x 47 cm x 28 cm |

Produkt label

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af rammen.

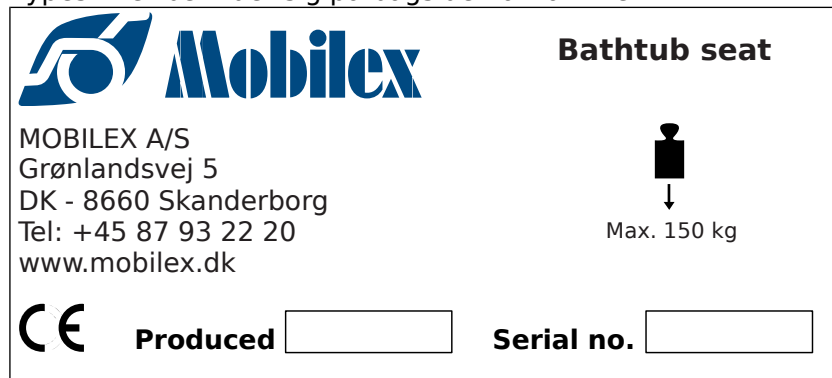

Billede af typeskiltet

5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Badekarsædet er normal vedligeholdelsesfrit, men det anbefales at kontrollere om gummidupskoene sidder korrekt og ikke er ved at falde af. Kontroller også at sædet sidder korrekt på.

Produktet udsættes for slid ved brug, og det anbefales regelmæssigt at få udført en kontrol af en fagmand.

6. Generel problemafjælpning

| Hvad er der sket? | Hvad kan være grunden? | Hvad skal jeg gøre? |
|---|--|---|
| PUR-sædet sidder ikke fast. | En eller flere af propperne der holder sædet på plads er ikke korrekt monterede. | Tag badekarsædet op af badekarret og vend det på hovedet. Kontroller om propperne sidder korrekt i hullerne. Hvis ikke vendes badekarsædet igen om, og der presses på PUR-sædet der hvor propperne sidder, indtil de går i indgreb. |
| Badekarsædet ligger ikke flat og stabilt på badekarrets sider, men kan røkke frem og tilbage. | Gummi dupskoene er ikke parallelle eller ligger ikke flat. | Kontroller om alle armene er justerede korrekt og om alle 4 gummi dupsko vender rigtigt og sidder rigtigt på armene. Juster længden af armene og vend gummidupskoene rigtigt. |

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Aqua badekarsindsats varenr. 302012

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr,**

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S



.....
Underskrift

Skanderborg, den 01.02.2010