


Vægmonteret Badestol

Montage- og brugervejledning varenr. 302040

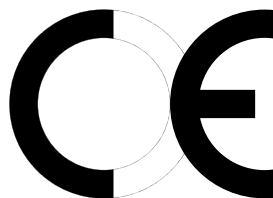

MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet og vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vores produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Ved spørgsmål bedes de henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet
- Benyt kun produktet til det oplyste formål

3. Beskrivelse

Montagebeskrivelse

Vægmontage : Montage må kun udføres af fagfolk. Montage-materiale hører ikke med i købet. Montage-materiale afhænger af væggens tilstand. Vælg 6 skruer, 6 dyvler og spændeskiver. Afmærk ved hjælp af montage-pladen de 6 huller. Bør nu de 6 huller og i sæt dyvlerne. Sæt bøjlen på plads i hullerne i teleskop-benene. Skru montage-pladen fast på væggen. Forsikre dem om, at badestolen er monteret korrekt ved, at slå badestolen.

Badestolen er indstillet rigtig når brugeren sidder på stolen og begge fødder rører gulvet. Vælg en normal stol som brugeren kan sidde på. Mål herefter afstanden fra gulv til sæde. Indstil herefter badestolens teleskop-ben efter denne opmåling. Grib clipsen med tommel og pegefinger og træk denne ud. Indstil teleskop-benene i den ønskede højde. Tryk Clipsen ind på plads igen. Indstil de resterende teleskop-ben i samme højde.

Funktionsbeskrivelse

Klap bade-stolen ud ved, at trække siddefladen fremad. Herved kommer benene til at stå på gulvet. Sæt dig på midten af siddefladen. Efter brug skubbes sidde n tilbage igen.

Tilbehør


For dette produkt er der intet andet tilbehør.

4. Tekniske data

Badestol-vægmonteret	302040 og 302041
Total bredde	45 cm
Total længde	45,5 cm
Sidde bredde	44 cm
Sidde længde	37 cm
Sidde højde	43,5 cm - 51 cm
Produktets vægt	3,5 kg
Maximal brugervægt	100 kg
Pakkemål	59 cm længde, 13 cm bredde, 48 cm højde

Typeskilt

Produkt skiltet er placeret på undersiden af sidde

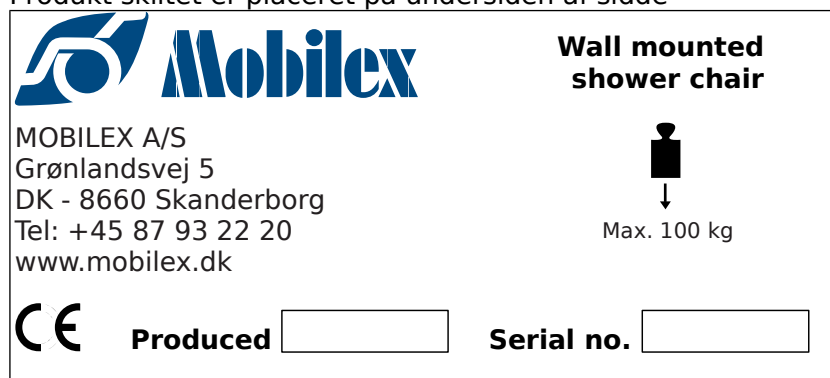

Billede af typeskiltet

5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

6. Generel problemafhjælpning

hvad er der skete?	hvad kan være grunden?	hvad skal jeg gøre?

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Badestol-vægmonteret varenr. 302040

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr,**

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S



Skanderborg, den 09-06-2006

.....
Underskrift