

Mobilex Aqua badebænk

Montage- og brugervejledning

Varenr. 302070-79



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Indledning

Kære kunde

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet og vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vores produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Formålsbeskrivelse

Badebænken giver mulighed for at sidde i forbindelse med bad. Hygiejneudskæringen letter vask og det bløde PUR-sæde giver en god siddekomfort.

Ved spørgsmål bedes de henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Kontroller at splitterne i benene sidder korrekt før ibrugtagning.
- Badebænken er til at sidde på. Der må ikke stå på den.

3. Beskrivelse

Montagebeskrivelse

De fire ben monteres i rørene og sikres i den ønskede position med medfølgende splitter. PUR-sædet monteres oven på badebænken.

Produktbeskrivelse

Badebænken er lavet af aluminium, og leveres med et blødt PUR-sæde. Badebænken kan højdeindstilles. Der findes 3 modeller, en smal, en bred og en ekstrabred.

Håndtering ved transport

Ved transport kan benene enten afmonteres eller placeres i højeste position for at reducere størrelsen.

Tilbehør


Ryglæn, der nemt kan monteres med splitter og uden brug af værktøj, fås som tilbehør.

4. Tekniske data

	Smal model	Bred model	Extra bred
Dimension (B x D x H)	52,5 x 53.5 x 60-77 cm	57.5 x 53.5 x 60-77 cm	62.5 x 53.5 x 60-77 cm
Sædemål (B x D)	42 x 34 cm	47 x 34 cm	52 x 34 cm
Sædehøjde	42 - 59 cm	42 - 59 cm	42 - 59 cm
Vægt	2,7 kg	2,9 kg	3,3 kg
Max. belastning	150 kg	150 kg	150 kg

Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af badebænken.

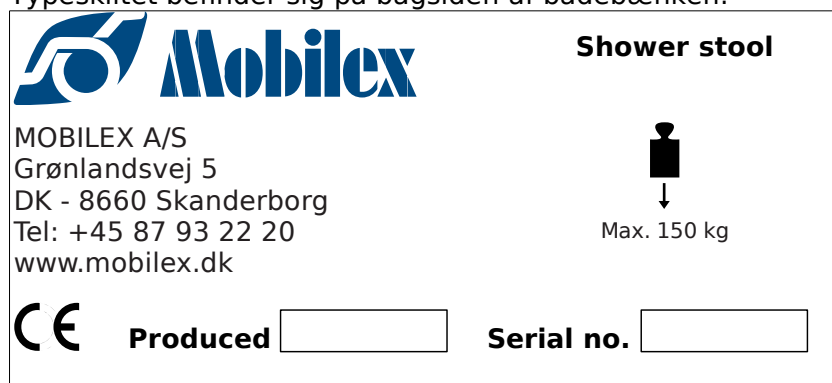

Billede af typeskiltet

5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

6. Generel problemafhjælpning

Problem	Afhjælpning
Badebænken er ustabil	Kontroller at benene er sikret med splitter, og er indstillet til samme længde

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Aqua badebænk

Varenr. 302070-79

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:



• **Retningslinjer 93/42/EWG**

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S

Skanderborg, den 2/8-2011

.....
Underskrift