

Mobilex lättvikt rollator Impala Varenr. 312060, 312061 och 312062

Installations- och bruksanvisning



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Inledning

Bäste kund!

Grattis och tack för att du har valt en Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna handbok innehåller en detaljerad produktbeskrivning och viktig information för korrekt användning. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Följ alla anvisningar och säkerhetsråd för att säkerställa och hålla en stabil och långsiktig användning av produkten.

Syftet

Rollatorn "Impala Economic" är avsedd att kompensera ett handikapp eller funktionshinder, samt utöka den fria rörligheten för användaren. Du kan använda rollatorn för inomhus- och utomhusbruk. Rollatorn är designad för att användas av endast en person.

För frågor om produkten, kontakta din återförsäljare eller Mobilex A/S

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Fax: +45 87 93 17 77
E-mail: info@mobilex.dk

2. Säkerhet

- Använd produkten endast i ett perfekt tekniskt skick
- Finns det någon skada eller fel på produkten, kontakta din återförsäljare omgående
- Observera informationen på produktetiketten
- Använda produkten endast för dess avsedda användning
- Vid hopfällning av rollatorn finns en ökad risk för klämskador
- Kontrollera före varje användning att bromsarna fungerar korrekt
- Använd endast rollatorn i helt uppfällt tillstånd.
- Rollatorn är inte lämpad för terränggående.
- Lås alltid bromsarna innan du sitter på den.
- Lås eller bromsa alltid med båda handtagen samtidigt.
- Maxvikt 120kg.
- Väskan under sätet får belastad med högst 5 kg.
- Skjutsa ej någon annan person på sätet
- Använd produkten bara i perfekt tekniskt skick
- Om du hittar någon skada eller defekt i produkten, vänligen kontakta omedelbart din återförsäljare, (observera informationen på produktens etikett)
- Använd produkten för avsett syfte

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

MOBILEX rollatorn "Impala Economic" har en mörkblå färgad aluminiumram och en bekväm mjuk sittplatta tillsammans med en polstrat ryggrör. Detta tillåter användaren att bekvämt sätta sig ner för paus och vila. Väskan under sitsen ger plats för mindre inköp. Dessutom är den utrustad med 2 låsbara bromsar och kan vikas.

Monteringsanvisning

MOBILEX rollatorn "Impala Economic" är redan monterad. Den levereras och förpackas i 1 kartong. Det enda som behöver installeras då man tagit den ur lådan är handtagen. De ställer man in efter brukarens längd.

Leveransomfattning:

- ✓ 1 rollator (chassi)
- ✓ 1 par löstagbara handtagsrör med bromskablar
- ✓ 1 par skruvar, brickor, muttrar för handtagsenheten samt dessa instruktioner

Före bruk gör du följande:

Kontrollera innehållet så att inget är skadat eller saknas. Om något är felaktigt, stoppa monteringen och kontakta din återförsäljare eller butiken.

1. Tryck fast bygellänken på höger och vänster sida och vik sitsen nedåt.
2. Stoppa i de 2 handtagsrören i ramrören (se bild). Ställ in önskad handtagshöjd och fixera rören med medföljande skruv och mutter.
3. Kontrollera att hjulbultarna (axlar) sitter ordentligt fast och att rollatorn är stabilt monterad och att inga delar vickar.
4. Kontrollera bromsfunktionen innan du använder rollatorn.
5. För att fälla ihop rollatorn, lyft sitsen och dra i handtaget inne i botten av väskan.
6. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på dig själv och/eller skada på rollatorn.



Funktionbeskrivning

För att spara utrymme kan man vika ihop rollatorn. Handtagen kan enkelt ställas in till din kroppslängd. Genom att sätta dig ner på vadderad sitsen kan enkelt ta en paus och vila en stund.

Hantering under transport

För enkel transport kan rollatorn fällas ihop.

Alternativ / Tillbehör

För MOBILEX rollatorn "Impala Economic" är inga ytterligare tillbehör tillgängliga.

4. Tekniska data

Tekniske data for Impala rollator	Varenr. 312060 Standard	Varenr. 312061 High	Varenr. 312062 Large
Totalhøjde / højde skubbehåndtag	78 - 93 cm	90 - 104,5 cm	78,5 - 92,5 cm
Totalbredde	61 cm	63,5 cm	66,6 cm
Længde (udfoldet)	70 cm	74,5 cm	70 cm
Måler sammenfoldet (H x B x D)	94,5 x 60,6 x 33	104,5 x 63,5 x 32,5	94,5 x 66,6 x 33
Sædehøjde	53 cm	63 cm	53 cm
Sædebredde (innerbredde)	44 cm	46 cm	53 cm
Bredde på sædet	35,5 cm	35,5 cm	40,5 cm
Dybde på sædet	32,5 cm	32,5 cm	32,5 cm
Max. belastning	150 kg	150 kg	150 kg
Max. vægt i Tasken	5 kg	5 kg	5 kg
Vægt	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
Bremser	2 låsbare	2 låsbare	2 låsbare

Produktetiketten

Märkskylten är placerad på den främre delen av ramen.

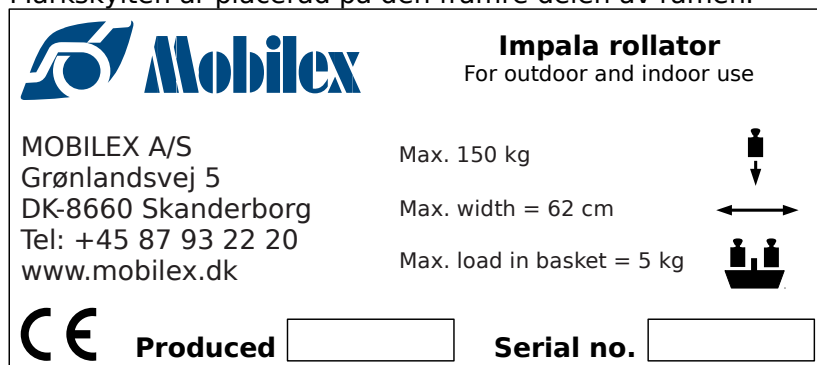


Bild på typskylten (ej original exempel)

5. Underhåll och skötsel

Normal smuts på metall-och plastdetaljer kan tas bort med konventionella rengöringsmedel. Använd endast kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel som är lämpade för rengöring och desinficering. (Inga lösningsmedel eller slipmedel). Ramdelarna på rollatorn kan torkas av med en fuktig trasa. OBS! Sand och havsvatten, och saltning på vintern leder till skador på lager och på hjul. Rengöra rollatorn efter varje användning under sådana omständigheter.

Trots den solida konstruktionen och det hållbara materialet, utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras regelbundet (minst 1 gg per år) av en expert. Denna årliga översyn bör omfatta följande kontroller: Kontrollera visuellt alla delar av ramarna för deformation, skador, slitage och korrosion, i synnerhet:

- ✓ Rollator-chassi
- ✓ Handtag och handtagsrör
- ✓ Bromshandtaget och bromskablarna
- ✓ Gafflar och länkhjul
- ✓ Hjulens bromsfunktion
- ✓ Sätet
- ✓ Alla fästelement (t.ex. muttrar, bultar, nitar) kontrolleras
- ✓ Bromsfunktion att kontrollera:
 - Bromsfunktion vid färd
 - Låsning av hjulbroms

6. Generella lösningar

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Rollatorn är svår att köra och styra.	Smuts mellan hjul och gafflar	Ta bort smuts eller hår mellan hjul och gaffel
Bromsarna fungerar inte.	Bromsbeläggen är slitna eller bromsarna är dåligt justerade	Kontrollera bromsställningen - ändra möjligen bromsbelägg (--> Service Center)
sätet inte är i en horisontell position.	de fyra hjulen är inte inriktade på samma höjd	Se till att hjulen är korrekt inriktade; Om inte, justera hjulens läge. (--> Service Center)

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte kastas bort med hushållsavfall, utan måste föras till närmaste återvinningsstation.

8. Garanti

Mobilex A/S erbjuder en garanti på 2 år på alla produkter mot fel i material och utförande under den. Mobilex A/S ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig eller oprofessionell montering och/eller reparationer som orsakats av försummelse eller slitage, samt av förändringar av användaren eller tredje part. I dessa fall upphör CE-garantin och produktansvar att gälla.

Garantin omfattar inte transportkostnader och skadeståndskrav i samband med icke-användning av produkten under reparationstiden. Dessutom finns det ingen garanti för skador som uppstår i bristande överensstämmelse eller missförstånd av denna manual. Vid upptäckt av material och produktion fel, vänlig kontakta återförsäljaren omedelbart eller direkt Mobilex A/S.

9. Deklaration om överensstämmelse (CE)

Företaget Mobilex A/S, 1 Nørskovvej, 8660 Skanderborg, Danmark deklarerar härmed, att produkten

Mobilex rollator Impala
Varenr. 312060, 312061 och 312062

har utformats i enlighet med den tekniska dokumentationen och hantverk som uppfyller följande grundläggande krav:

- **Direktiv 93/42/EEG av EU-rådet**

Lars Nygaard
Verkställande Direktör
Mobilex A/S



.....
Signatur

Skanderborg, på 10-12-2015