

## **Mobilex rollator "Tiger"** **Varenr. 312201**

### **Monterings- og brugervejledning**



**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark  
www.mobilex.dk

## 1. Indledning

Kære kunde

Vi glæder os over, at De har købt et førsteklasses Mobilex produkt. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt brug af produktet. Derfor bedes De læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i anvendelse. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler, især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så De opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.

### Formålsbeskrivelse

Mobilex "Tiger" rollatoren er beregnet til at afhjælpe bl.a. gigtpatienters behov, således at de kan bevæge sig uden besvær og bedre komme omkring ved egen hjælp. Aflastningen sker ikke gennem hænderne, men gennem underarmsstøtterne. Brugeren skal besidde nogle kræfter for at kunne anvende produktet hensigtsmæssigt.

Rollatoren er konstrueret, så den øger mobiliteten for personer, som har problemer med at stå eller gå. Rollatoren gør det muligt for disse personer at genvinde evnen til at lave daglige gøremål. Rollatoren er skabt til personer, der som følge af forskellige sygdomme har behov for stabil støtte ved gang. I stedet for de klassiske håndtag blev rollatoren udstyret med høje underarmsstøtter, hvilket giver brugeren en større stabilitet. Rollatoren må ikke bruges til andet end som støtte til at kunne stå, gå og sidde.

#### NB



Rollatoren bør ikke bruges af personer, der har problemer med balancen og har en tydeligt svækket muskelkraft, hvorfor de ikke er i stand til selv at stå eller gå. Rollatoren skal være anbefalet af en fysioterapeut eller læge.

Underarmsstøtterne formindsker rollatorens stabilitet, hvorfor denne kun må bruges på et jævnt underlag indendørs. Eventuelle hindringer såsom dørtrin etc. skal udlignes, så man kan køre over dem, eksempelvis vha. Mobilex dørtrins- eller gummiramper.

Hvis De har spørgsmål til produktet bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S.

#### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex.dk

## 2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i teknisk fejlfri stand
- Såfremt De konstaterer skader eller fejl på produktet, bedes De omgående kontakte
- Vær opmærksom på angivelserne på den påsatte produktlabel
- Benyt kun produktet til det oplyste formål
- Ved alle samlinger på rollatoren er der risiko for at led kan komme i klemme
- Kontroller hver gang før brug om hjulbremsene fungerer upåklageligt
- Benyt kun rollatoren, når den er fuldt udklappet og låsemekanismen er aktiveret
- Benyt kun rollatoren indendørs på fladt, fast underlag
- Benyt kun rollatorsædet, når bremsene er låst fast
- Aktiver eller lås altid begge bremsen samtidigt
- Rollatoren må max. belastes med 150 kg i alt
- Indkøbstasken har en max. bæreevne på 5 kg
- Der må ikke medtages en ekstra person på sædet
- Der må ikke foretages ændringer på produktet uden producentens skriftlige godkendelse
- Rollatoren skal altid være bremset, når den ikke benyttes

### 3. Beskrivelse


#### Produktbeskrivelse

Mobilex rollatoren "Tiger" har et pulverlakeret aluminiumsstel og er udstyret med 4 hjul. Letvægts-aluminiumsstellet gør det let at folde rollatoren sammen samt opbevare og transportere den. Den er let at manøvrere og er tilstrækkelig stabil. Undersarmsstøtterne er højdeindstillelige. Rollatoren er fra fabrikken af udstyret med et monteret sæde og en indkøbstaske.

#### Leverede dele samt montagevejledning

Mobilex rollatoren "Tiger" leveres i en kasse med følgende indhold:

- ✓ 1 rollator
- ✓ Denne brugervejledning

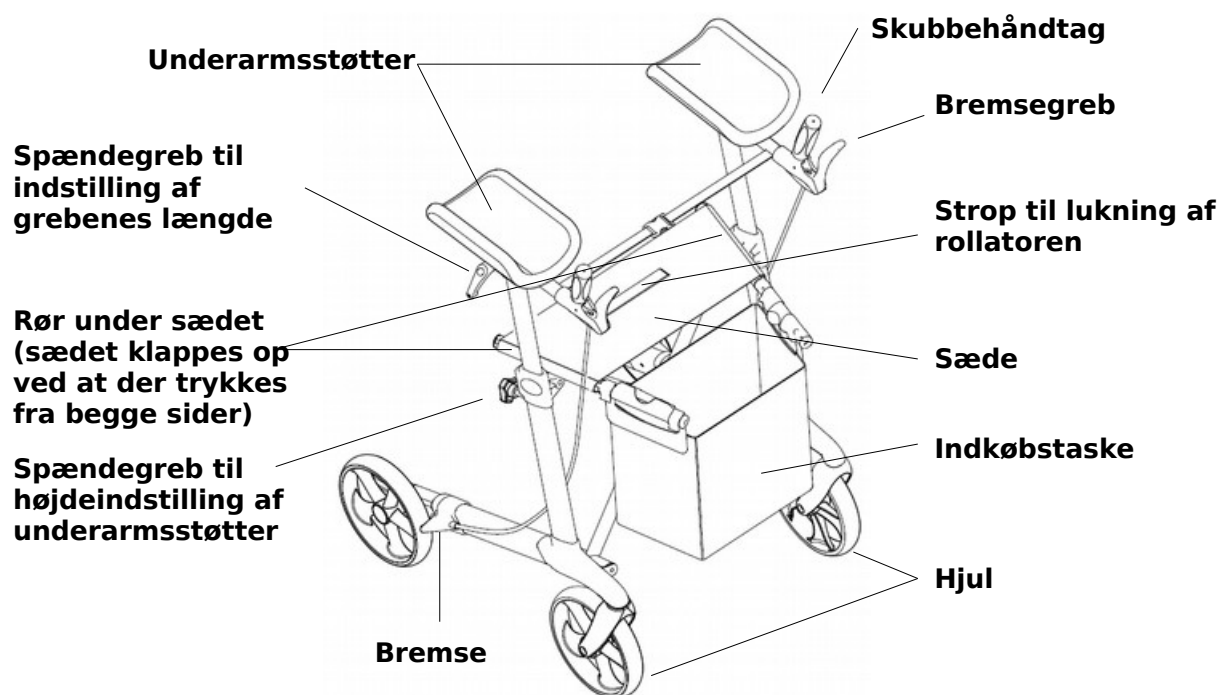

#### Kontrol ved modtagelsen

Efter at De har pakket rollatoren ud, skal De først kontrollere, om noget mangler, og om alle delene, der er vist på tegningen, er der. Hvis De konstaterer, at der mangler nogle dele, skal De straks kontakte forhandleren.

#### Udklapning af rollatoren

- Tag fat om begge rør under sædet og tryk dem ned, indtil rammen er klappet ud, og De kan høre et klik. Nu er udklapningsanordningen låst fast. Check for en sikkerheds skyld efter ved at forsøge at trykke rollatoren sammen.
- Fastgør stroppen, som forbinder begge skubbehåndtag (se foto).
- Kontroller at spændegrebene til højdejustering er spændt nok fast
- Kontroller når rollatoren er klappet ud, om stroppen er blokeret
- Efter udklapning skal De kontrollere, om begge håndtag er i samme højde og stabile.



Brug af en defekt rollator er strengt forbudt. Kontroller altid før brug om alle dele fungerer. Hvis ovenstående anbefalinger ikke følges, kan brugeren få fysiske skader.

#### Sammenklapning af rollatoren

- Først skal De løsne stroppen, der er fastgjort mellem begge skubbehåndtag
- Træk i låsestroppen ved sædet, indtil rammen klapper sammen
- Nu er rollatoren klappet sammen

### Højdeindstilling af underarmsstøtter

- Først skal De løsne stroppen, der er fastgjort mellem begge skubbehåndtag
- Løsn spændegrebet ved at dreje denne til venstre
- Indstil højden
- Drej spændegrebet til højre
- Fastgør stroppen igen

Begge greb bør altid være indstillet til samme højde. Korrekt indstillede armstøtter bør circa være i brugerens albuehøjde, når denne står med løst hængende arme.

### Indstilling af længden på skubbehåndtagene

- Først skal De løsne stroppen, der er fastgjort mellem begge skubbegreb
- Løsn spændegrebet ved at dreje dette til venstre
- Indstil længden
- Drej spændegrebet til højre
- Fastgør stroppen igen

### Bremsefunktionen

- For at bremse skal De trække begge bremsegreb mod Dem selv
- Jo kraftigere man trækker i bremsegrebene, desto større er bremsevirkningen
- For at rollatoren forbliver STOPPET skal De fortsat holde bremsegrebene trukket
- For at få rollatoren i BEVÆGELSE skal De give slip på bremsegrebene, hvorved bremserne automatisk deaktiveres



*Aktiver altid bremserne, når De ikke benytter rollatoren!*

*Løsn aldrig bremserne, når De sidder på rollatoren!*

*Når De stiller rollatoren på et skråt underlag, skal bremserne altid være aktiveret!*

### Aktivering og deaktivering af bremser

- For at få rollatoren til at stoppe skal De trække bremsegrebene opad
- For at parkere rollatoren skal De trykke bremsegrebene nedad, indtil der høres et klik
- Rollatoren må man kun sidde på, når bremserne er i låst position
- Før De kører videre skal De stille Dem i kørselsretningen og løsne bremsegrebene ved at trække dem opad



*Ved parkering skal bremserne altid være i fastlåst position*

*Sædet må aldrig bruges uden blokerede bremser!*

*Når De sidder ned, må De aldrig læne dem bagud. Det anbefales kun at sidde på den forreste del af sædet og undlad at sidde på tasken*

### Funktionsbeskrivelse

Da rammen er sammenklappelig, kan rollatoren foldes sammen og således fylde meget lidt. Skubbestængerne kan indstilles trinvist efter Deres kropsstørrelse. Takket være sædet kan De holde hvilepauser

### Tilbehør

Til Mobilex "Tiger" rollator fås forskelligt tilbehør såsom stokkeholder, slæbebremse. Henvendelse herom bør ske til forhandleren.

### Håndtering under transport

Det anbefales at transportere rollatoren i sammenklappet stand. Dens konstruktion gør det muligt på en let måde at klappe den ud og klappe den sammen. Man bør sikre sig, at rollatoren befinder sig i en stabil position under transporten, således at den ikke bliver skæv.

### Anvendelse


Stil Dem midt bag ved baghjulene. Læg underarmene på støtterne og tag fat om håndtagene. Underarmsstøtterne fjerner belastningen af Deres håndled. Bremserne er specialudviklet, således at kun en lille kraftanstrengelse er nødvendig.

#### 4. Tekniske data

<b>Mobilex rollator Tiger</b>	<b>Standard</b> Varenr. 312201 (antrasit)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	95 cm - 120 cm
Sædehøjde	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	62 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm
Længde (dybde)	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	9,5 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

#### Produktlabel

En produktlabel er anbragt på den nederste rammedel

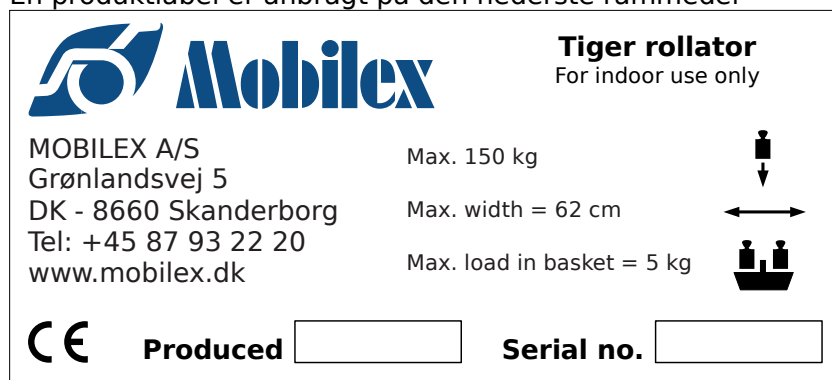

Eksempel på produktlabel (ikke original)

#### 5. Vedligeholdelse og pleje

Normal snavs på metal- og plastdele kan fjernes med normale rengøringsmidler. Læg mærke til de pågældende indholdsstoffer og brug udelukkende rengøringsmidler, der er egnet til rengøring og desinficering (ingen opløsnings- eller skuremidler).

Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil rollatoren blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at få en fagmand til at checke den efter jævnlige (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende checkes efter: Visuel kontrol af alle rammedele hvad angår skævheder, beskadigelser, slid og korrosion samt i særdeleshed kontrol af:

- ✓ Rollatorstellet
- ✓ Skubbestænger, håndtag og rygbælte
- ✓ Bremsegreb og bremsekabler
- ✓ Styregafler og forhjul
- ✓ Baghjul med bremser
- ✓ Sæde og låseanordning
- ✓ Indkøbstaske
- ✓ Check efter om der mangler nogle montagedele (fx møtrikker, skruer, nitter...) og om de fungerer og er i god stand
- ✓ Kontroller bremsefunktionen ved sænkning af farten ved bremsning af hjulene

#### Rensning af hjulene

Det anbefales at rengøre hjulene med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Foretag også smøring af lejer ved at spraye et smøremiddel på engang imellem eller når hjulene begynder at knirke.

## 6. Genanvendelse

Rollatoren er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse skal den rengøres og desinficeres samt være kontrolleret i henhold til alle punkter nævnt under pkt. 5 "Vedligeholdelse og pleje"

## 7. Løsning af almindeligt forekommende problemer

Problembeskrivelse	Mulig årsag	Løsningsforslag
Rollatoren er svær at styre eller skubbe	Snavs mellem hjul og gafler	Fjern evt. snavs og hår mellem hjul og gaffel
Bremserne virker ikke eller virker kun i den ene side	Bremseklodser er slidt eller bremsen er forkert indstillet	Kontroller hvordan bremsene er indstillet, udskift evt. bremseklodser (→ serviceværksted)
Sædet går ikke rigtigt i hak ved udklappning	Låseanordningen er forkert indstillet eller defekt	Check at låseanordningen er rigtigt indstillet eller udskift denne (→ serviceværksted)

## 8. Bortskaffelse af produktet

Produktet kan ikke bortskaffes med almindeligt affald men skal afleveres på en lokal genbrugsplads.

## 9. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## 10. Konformitetserklæring (CE)

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

### **Mobilex arthritis rollator "Tiger" varenr. 312201**

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:



**EU Council Directive 93/42/EEC for Medical Equipment**

Lars Nygaard  
Direktør  
Mobilex A/S



Skanderborg, 03.08.2018

.....  
Underskrift