

Mobilex Rollator "Leopard"

Art-nr. 312300, 312301, 312302, 312304, 312306, 312308 och 312309

Installations- och bruksanvisning



CE

MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Inledning

Bästa kund!

Grattis och tack för att du har valt en Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna handbok innehåller en detaljerad produktbeskrivning och viktig information för korrekt användning. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Följ alla anvisningar och säkerhetsråd för att säkerställa och hålla en stabil och långsiktig användning av produkten.

Syftet

Rollatorn "Leopard" är avsedd att kompensera ett handikapp eller funktionshinder, samt utöka den fria rörligheten för användaren. Rollatorn är utformad för personer som behöver stabilt stöd på grund av rörelsehinder, men som själv kan använda rullatorn utan risken att skada sig själv eller andra personer. Du kan använda rollatorn för inomhus- och utomhusbruk. Rollatorn är designad för att användas av endast en person. Med hjälp av en smidig parkeringsbroms och en vikbar sitttyta har man alltid möjlighet att ta en liten paus för att vila lite.

Rollatorn är inte avsedd för personer med balansproblem eller för de som inte har gott om kraft att hantera ensam.

Användning och behov av en rollator bör alltid diskuteras och avstämmas med läkaren eller sjukgymnasten.

För frågor om produkten, kontakta din återförsäljare eller Mobilex A/S

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefon: +45 87 93 22 20
E-mail: info@mobilex.dk

2. Säkerhet

- Använd produkten bara i perfekt tekniskt skick
- Finns det någon skada eller fel på produkten, kontakta din återförsäljare omgående, (observera informationen på produktens etikett)
- Använd produkten enda för dess avsedda användning
- Vid hopfällning av rollatorn finns en ökad risk för klämskador
- Kontrollera före varje användning att bromsarna fungerar korrekt
- Använd rollatorn endast i helt uppfällt tillstånd.
- Rollatorn är inte lämpad för terränggående.
- Lås alltid bromsarna innan du sitter på den.
- Lås eller bromsa alltid med båda handtagen samtidigt.
- Se till att alltid bromsarna är i parkeringsläge när du parkerar rollatorn och släpp de sedan igen innan du använder rollatorn.
- Användarens maxvikt: 150kg.
- Väskan får belastas med högst 5 kg.
- Optional tillhörande bricka får belastas endast med lättare föremål, med högst 5 kg (finns som extra tillbehör)
- Skjutsa ej någon annan person eller djur på sitsen
- Utan skriftligt godkännande av tillverkaren får inga ändringar av produkten göras .
- Se till att bromsarna ALLTID sitter i parkeringsposition när rollatorn ställas åt sidan, och släpps igen innan rollatorn används.

3. Beskrivning

Produkt Beschreibung

Den lättgående och lätt manövrerande Mobilex Rollator "Leopard" har en pulverlackerad aluminiumram och är utrustad med 4 hjul.

Rollatorn har 2 låsbara bromsar och kan vikas med hjälp av ett knutkors. Som standardutrustning finns det en flexibel sitttyta, en inköpsväska, vadderat ryggband och en käpphållare.


Med hjälp av justerbar körhandtagen är rollatorn anpassbar till användarens kroppshöjd.

Leverans och monteringsanvisning

Mobilex rollatorn "Leopard" är redan monterad. Den levereras förpackad i en kartong. Det enda som behöver installeras då man tagit den ur lådan är käpphållaren. Handtagen ställer man in efter brukarens längd.

Leveransens omfattas:

- ✓ 1 rullator (vikad), inklusive sits, käpphållare, ryggbälte och inköpsväska
- ✓ denna bruksanvisning

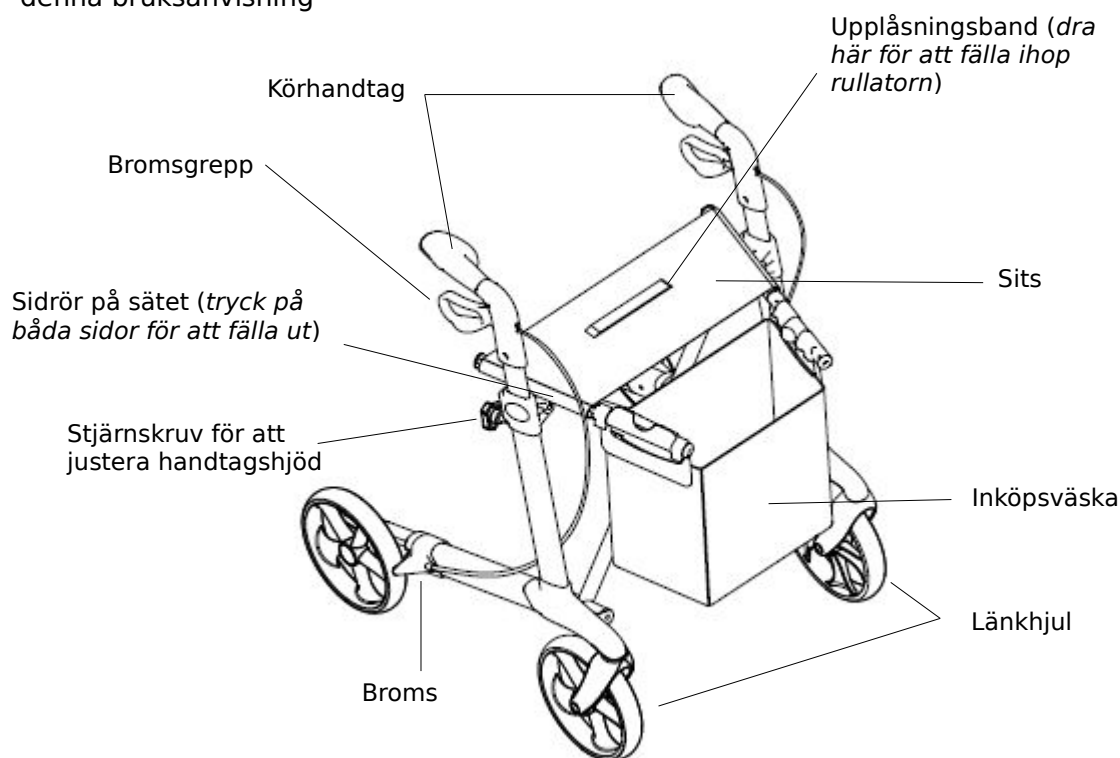

Första kontrollen

- Kontrollera förpackningens innehåll på fullständighet.
- Prova att alla delar är närvarande som är synliga på ritningen.
- Om saknas något, kontakta omedelbart din återförsäljare.

Fälla ut gånghjälpmedel

- Placera den vikta rullatorn bredvid dig.
- Tryck på röda knappen på sätesrör (se bild till höger)
- Ta tag samtidigt i båda sätesrören och tryck de ner, tills du hör ett "klick"-ljud från låssystemet.
- Rollatorn är nu vikad ut och säkrade mot en oavsiktlig viking.



Se till att sätesrören "klicka" in fast på båda sidor när du fällar ut rullatorn
Alla delar måste vara ordentligt låsta och rollatorn måste stå stabil innan rullatorn får användas.

Fälla ihop gånghjälpmedel

- Dra upp frigöringsfliken för att fälla ihop rollatorn.
- Vik rollatorn tills den klickar på plats.
- Gånghjälpmedel är vikta.

Körhandtag montering och höjdjustering

- Lossa skruven för höjdjustering
- Placera handtagen i önskad höjd
- Dra åt igen skruven för höjdjustering



Båda handtagen skall alltid ställas i samma höjd. Korrekt justerade handtag ska nå användarens armbågshöjd när användaren står rakt upp med lös hängande armar.

Bromsarnas användning

- För att bromsa, dra upp båda bromsspakar.
- Ju starkare man drar i bromshandtagen, desto starkare är bromseffekten.
- för att förbli STOPPAD håll dragit bromshandtagen.
- Lossa bromsarna för att rulla vidare med rollatorn. De släpps automatiskt.



*Aktivera ALLTID parkeringsbromsarna när du inte använder rollatorn!
Släpp ALDRIG parkeringsbromsarna när du sitter och vilar på rollatorn!
Aktivera ALLTID parkeringsbromsarna när du parkera rollatorn på ojämna stigar.*

Låsa / släppa bromsarna

- Dra bromsspakarna upp för att få stanna rollatorn.
- För att få parkera, tryck ner bromsspakarna tills du hör ett "klick".
- Rollatorn får endast användas som sittplats när bromsarna är låsta.
- Innan du börjar köra igen, ställ dig upp i körriktningen och släpp bromsspakarna genom att dra de upp.



*Lås ALLTID bromsarna när du parkerar.
Sätet får aldrig användas UTAN att bromsarna är blockerade!
Luta dig aldrig tillbaka när du sitter. Rekommenderas att använda endast den främre utrymme av sittplatsen men inte att sätta sig på väskan eller luta dig tillbaka.*

Funktionsbeskrivning

Med hjälp av vikbar ramkonstruktion kan rollatorn fällas ihop för att ställa den i sidan och spara utrymme. Körhandtagen anpassas på användarens kroppslängd genom steglös höjdjustering. Sitsen gör att du kan ta kortare pauser.

Hantering vid transport

Alltid rekommenderas att transportera produkten vikta. Dess konstruktion möjliggör enkel vikning. Se till att produkten befinner sig i ett stabilt läge under transporten, utan att kunna röra sig.

Användning

Stå i mitten mellan bakhjulen, ta tag i handtagen och släpp bromsarna. Bromsarna är speciellt utvecklade så att ingen särskilt ansträngning krävs.

Alternativ / Tillbehör

Olika tillbehör finns tillgängliga för Mobilex Leopard Rollator (en andra kähphållare, bricka, fast och vadderad säte, paraply, enhandsbroms o.s.v.).

4. Tekniska data

Mobilex rollator "Leopard"	Art. 312301 (röd) Art. 312304 (grå) Art. 312300 (grön) Art. 312309 (blå)	Art. 312306 (grå) Art. 312308 (röd) med soffhjul	Art. 312302 (grå) sitthöjd 55 cm
Total bredd i körläge / vikta	60,8 cm / 22,5 cm	60,8 cm / 22,5 cm	60,8 cm / 22,5 cm
Inre bredd mellan handtagen	46 cm	46 cm	46 cm
Total längd	66 cm	66 cm	66 cm
Sitthöjd	62 cm	62 cm	55 cm
Justerbar handtagshöjd	74,5 - 102 cm	74,5 - 102 cm	74,5 - 102 cm
Max. last	150 kg	150 kg	150 kg
Max. last av inköpsväskan	5 kg	5 kg	5 kg
Total vikt	7,6 kg	7,7 kg	7,5 kg
Bromsar	2 låsbara	2 låsbara	2 låsbara

Produktetiketten

Typetiketten är placerad på den nedre delen av ramen

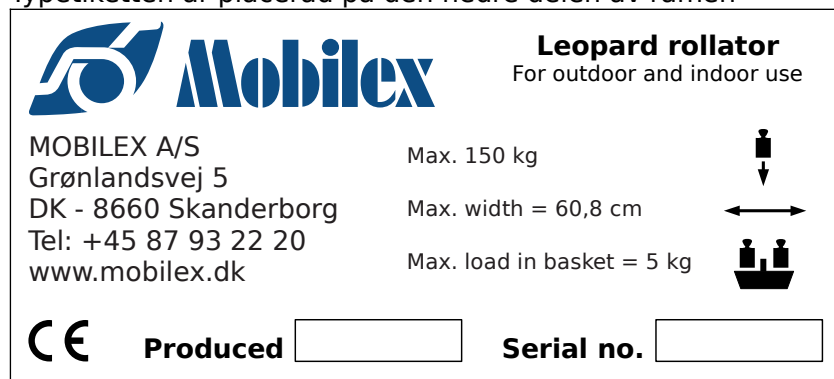


Bild på typskylten (ej original exempel)

5. Underhåll och skötsel

Normal smuts på metall- och plastdelar kan tas bort med varmt tvålatten eller vanliga rengöringsmedel. Använd endast kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel som är lämpade för rengöring och desinfektering. (Inga lösningsmedel eller att de innehåller slipmedel, inga starka alkaliska rengöringsmedel, stela borstar eller skarpa instrument). Ramens delarna på rollatorn kan torkas av med en fuktig trasa.

OBS! Sand, havsvatten och saltning på vintern kan leda till skador på lager och hjul. Rengör rollatorn efter varje användning under sådana omständigheter.

Trots den solida konstruktionen och användning av resistent material är produkten utsatt för visst slitage. Därför rekommenderas att kontrolleras produkten i regelbundna intervaller av en fackman respektive expert. (minst 1 gång per år)

Denna årliga översyn bör omfatta följande kontroller: Kontrollera visuellt alla delar av ramen för skador, slitage och korrosion, i synnerhet:

- ✓ Rollatorchassi
- ✓ Handtag och handtagsrör
- ✓ Bromshandtaget och bromskablarna
- ✓ Gafflar och länkhjul
- ✓ Hjulens bromsfunktion
- ✓ Sätet och låsmekanism
- ✓ Alla fästelement (t.ex. muttrar, bultar, nitar) kontrollera att de inte är sönder eller lösa.
- ✓ Kontrollera så att bromsfunktionen fungerar vid:
 - Bromsfunktion under färd
 - Låsning av hjulbroms vid parkering eller vid vila på sitsen.

Rengöring av hjulen

Rekommenderas att rengöra hjulen med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Var uppmärksam på lämplig smörjning av lagren i kortare intervaller men senast när hjulen börjar göra ljud. Använd vanlig smörmedel eller sprutsmörmedel.

6. Återanvändning

Rollatorn är lämplig för återanvändning. Rollatorn måste rengöras och desinficeras före återanvändning. För godkännande skall utföras alla kontroller listas under punkt 5 "Underhåll och skötsel".

OBS! Det är absolut förbjudet att återanvända rollatorn när ramen är böjd eller är trasig!

7. Generella lösningar

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Rollatorn är svår att köra och styra	Smuts mellan hjul och gafflar	Ta bort smuts eller hår mellan hjul och gaffel
Bromsarna fungerar inte	Bromsbeläggen är slitna eller bromsarna är dåligt justerade	Kontrollera bromsinställningen - ändra möjligen bromsbelägg (→ Service Center)
Låsmekanismen knäpper inte i vid uppfällning	Låsmekanism är inte rätt justerad eller så är den defekt	Kontrollera justeringen av låsmekanismen eller byt (→ Service Center)

8. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte kastas bort med hushållsavfall, utan måste föras till närmaste återvinningsstation. Kontrollera med en lokal avfallsföretag eller återvinningscentral enligt avfallsföreskrifterna eller kontakta din återförsäljare.

Detta möjliggör hållbar återvinning.

9. Garanti

Mobilex A/S erbjuder en garanti på alla produkter mot fel i material och utförande under den lagstadgade garantiperioden i landet. Mobilex A/S ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig eller oprofessionell montering och/eller reparationer som orsakats av försummelse eller slitage, samt av förändringar av användaren eller tredje part. I dessa fall upphör att gälla CE-garantin och produktansvar.

Garantin omfattar inte transportkostnader och skadeståndskrav i samband med icke-användning av produkten under reparationstiden. Dessutom finns det ingen garanti för skador som uppstår i bristande överensstämmelse eller missförstånd av denna manual.

Vid upptäckt av material- och produktionsfel, vänlig kontakta återförsäljaren omedelbart eller direkt till Mobilex A/S.

10. Deklaration om överensstämmelse (CE)

Företaget Mobilex A/S, 1 Grønlandsvej, 8660 Skanderborg, Danmark deklarerar härmed, att produkten



har utformats i enlighet med den tekniska dokumentationen och hantverk som uppfyller följande grundläggande krav:

- **Direktiv 93/42/EEG av EU-rådet**
för medicintekniska produkter, bilaga I den 14 juni 1993

Thomas Christensen Nygaard
Verkställande Direktör
Mobilex A/S

Skanderborg, på 15.05.2019

.....
Signatur

Tillbehör för Leopard rollator

Art.Nr.	namn
312340	paraply inkl monteringsbeslag
312315	fast, vadderad säte
312320	hastighetsreduceringsbroms, sats för 2 hjul
312322	käpphollare komplet
312325	bricka
312355	ryggband L=810 mm
312332	ryggband H=200 mm, L=810 mm
312347	låsbar väska med dragkedja
312364	meshficka öppen
312365	meshficka låst
312368	ringklocka röd (blå = 312369)
31236A	vit LED ljus för rollator
31236B	röd LED ljus för rollator
312321	syreflaskhållare



Reservdel för Mobilex rollator Leopard

Art.Nr.	namn
312310	standardsäte inkl. släpptejp
31232A	bromskabel
31232D	bromsblock (sats för 2 hjul)
312329	kabelsats för enhandsbroms
D3150	montering av enhandsbroms
31233B	körhandtag med bromskabel till höger
31233C	körhandtag med bromskabel till vänster
31233E	anatomisk handtag till höger
31233F	anatomisk handtag till vänster
312334	fronthjul svart
312335	bakhjul svart
312338	fronthjul svart SOFT
312337	bakhjul svart SOFT
31233K	gaffel till fronthjul
219901	svart lock för rullatorhjul
312345	inköpsväska standard
312361	komplett låsmekanism, inklusive rör

QUICK GUIDE

Mobilex rollator Leopard

Item nr. 312301, 312302, 312304, 312306, 312308

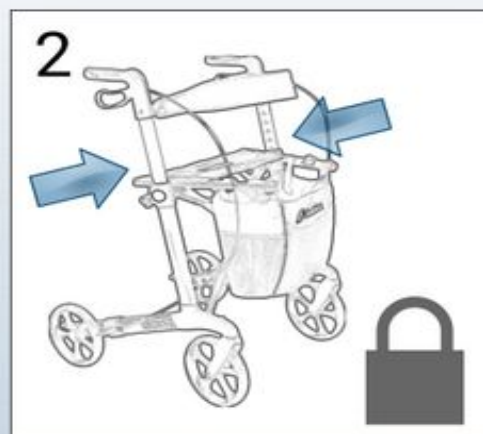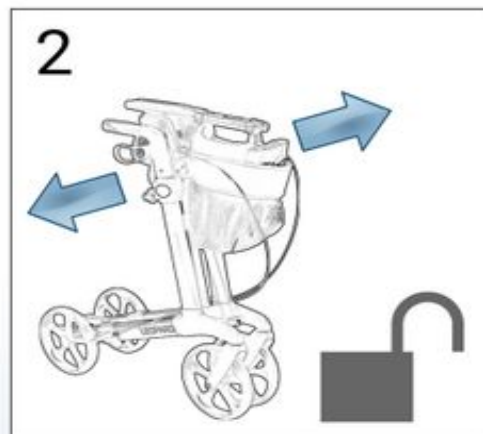

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - www.mobilex.dk