

Mobilex "Jaguar" rollator inomhus

Art. Nr. 312410 och 312411

Installations- och bruksanvisning



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex.dk

1. Inledning

Bäste kund,

Grattis och tack för att du har valt en Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna bruksanvisning innehåller en detaljerad produktbeskrivning och viktig information för korrekt användning. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Följ alla anvisningar och säkerhetsråd för att säkerställa och hålla en säker och långsiktig användning av produkten.

Syftet

Rollatorn "Jaguar" är ett mycket praktiskt rullande gånghjälpmedel för användning inomhus. Rollatorn ger stöd och säkerhet och är avsedd att kompensera ett handikapp eller funktionshinder, samt utöka den fria rörligheten för användaren. Rollatorn har en vacker och elegant design och är avsedd endast för inomhusbruk. Utomhusbruk är inte tillåtet. Den är designad för att användas av endast en person.

Indikation

Enheten är avsedd endast för personer som behöver ett stabilt stöd när man går, på grund av hälsoproblem.

Kontraindikation

Rollatorn är inte utformad för människor, till exempel med balansrubbingar eller med otillräcklig muskelstyrka som inte kan använda rollator utan själv eller yttre hot.

Användning av eller behovet av en rollator bör alltid samordnas med läkaren eller sjukgymnasten.

För frågor om produkten, kontakta din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-post: info@mobilex.dk

2. Säkerhet

- Använd produkten endast i ett perfekt tekniskt skick
- Finns det någon skada eller fel på produkten, kontakta din återförsäljare omgående
- Observera informationen på produktetiketten
- Använd produkten endast för dess avsedda användning
- Vid hopfällning av rollatorn finns en ökad risk för klämskador
- Kontrollera före varje användning att bromsarna fungerar korrekt
- Använd endast rollatorn i helt uppfällt tillstånd.
- Rollatorn är inte lämpad för utomhusanvändning, endast tillåtet för inomhusbruk.
- Rollatorn är godkänd endast för personer med en maximal vikt till 100 kg
- Väskan får belastad med högst 5 kg.
- Inga ändringar av produkten får komma att göras utan skriftligt medgivande från tillverkaren
- Kontrollera alltid att bromsarna är parkeringsläge när du stoppar rollatorn, och upplöstes igen innan du använder rollatorn
- Alla 4 hjulen måste alltid ha kontakt med golvet

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Den lättgående Mobilex rollator "Jaguar" har en aluminiumram med 4 hjul. Den är utrustad med 1 låsbar dubbelbroms för 2 bakhjul och kan vikas ihop med hjälp av knappen under korgen. Rollatorn kan lätt manövreras, är lätt att använda i trånga utrymmen till exempel när man ska in i badrummet, och har den nödvändiga stabiliteten. Körhandtag är ställbar i höjd. Dessutom är rollatorn utrustad med en bricka och en korg med påse. Avtagbar brickan ger avlastningsplats för

kanske en tallrik eller en kopp kaffe eller te. Man kan ha rollatorn "Jaguar" som sängbord eller som bord att äta från och självklart som serveringsvagn eller som stöd om du behöver stiga upp ur fåtöljen, soffan eller sängen.

Leverans och förpackningsinnehåll

Mobilex rollatorn "Jaguar" är komplett med korg och brickan förpackad i en stabil kartong. Leveransinnehåll:

- ✓ 1 rollator ihopfälld i kartongen
- ✓ den här bruksanvisningen



Moneringsanvisning

- Ta ut rollatorn ur kartongen och ställ den upprätt i golvet
- Jämför med ovanstående lista och titta om något saknas. Om du upptäcker att en del saknas eller är skadad, avbryta installationen och kontakta omgående din återförsäljare.
- Håll körhandtaget med ena handen och dra försiktigt en av de bakre ramben med den andra handen bakåt.
- Tryck ner försiktigt körhandtaget tills ramen är helt öppen.
- Rollatorn är helt öppnad, när du hör ett tydligt "klick".
- Placera den öppna rollator på en plan yta. Alla 4 hjul skall ha kontakt med golvet!
- Se alltid till att ramen är stabil, om rollatorn är öppen.
- Positionera alltid båda körhandtagen på samma höjd! (Se funktionsbeskrivning).
- Se till att de röda knapparna är ordentligt låsta, så att rollatorn är stabil och delarna inte kan röra sig när last kommer på de.
- Kontrollera alltid att alla delar på rollatorn är ordentligt och säkert fastsatt.
- Att ignorera dessa varningar kan under vissa omständigheter leda till skador.

Funktionsbeskrivning

- Ställ in höjden på handtagsenheten så att handtagen är i höjd med handleden när brukaren står med armarna rakt ner bredvid rollatorn. Detta innebär att armarna skulle ha en vinkel på 20 ° -30 ° när rollatorn används. Öppna röd tryckknapparna på varje sidan och justera handtag i önskad höjd. När rätt höjd ställts in, stäng igen röda tryckknapparna. Försäkra dig att körhandtaget är inställt till samma höjd på båda sidor.
- Kontrollera varje gång innan du använder rollatorn, att alla justeringar är säkrad och att hjul och andra rörliga delar funkar bra.

Bormsarna

- För att stoppa rollatorn, helt enkelt dra bromsspaken uppåt och håll den så att rollatorn bromsas. För att rulla igen släpp helt enkelt bromshandtag.
- För att låsa bromsarna, dra bromsfästet uppåt och låsa den med den röda C-Klip (se föregående bild). För att frigöra bromsen dra bromsspaken uppåt igen och tryck på den röda C-Klip försiktigt framåt.
- Vid användning av rullatorn i ett stationärt läge måste bromsarna alltid låst. (användning som sängbord eller matbord) Du bör alltid sätta bromsarna in i parkeringsposition, om du inte planerar att flytta rollatorn. Aldrig låt stå rollatorn utan låsta bromsar.

Fälla ihop av rollatorn

- Ta bort brickan från rollatorn
- Tryck på knappen på ramstången under korgen och skjut bakre ramben något mot främre benet för att fälla ihop rollatorn.

Transport

Rollatorn kan fällas ihop för transport (se ovan)

Tillbehör

Inga extra tillbehör är tillgängliga till den här rollatorn.

4. Tekniska data

Mobilex Rollator "Jaguar"	varenr. 312410 (orange) - 312411 (lyse blå)
Total längd	66 cm
Total bredd	54,5 cm
Justerbar handtagshöjd	83,5 - 94,5 cm
Total vikt	6,3 kg
Max. brukarevikt	100 kg
Max. last av väskan	5 kg
Max. last av brickan	5 kg
Hjul storlek	7"
bromsar	1 låsbar dubbelbroms på bakhjul

Produktetiketten

Märkskylten är placerad på den främre delen av ramen.


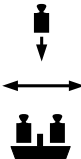


	Jaguar rollator For indoor use only
MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Tel: +45 87 93 22 20 www.mobilex.dk	Max. 100 kg Max. width = 54,5 cm Max. load in basket = 5 kg
	
 Produced <input type="text"/>	Serial no. <input type="text"/>

Bild på typskylten (ej original exempel)

5. Underhåll och skötsel

Normal smuts på metall- och plastdetaljer kan tas bort med vanliga rengöringsmedel. Använd endast kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel som är lämpade för rengöring och desinficering. (Inga lösningsmedel eller att de innehåller slipmedel). Ram delarna på rollatorn kan torkas av med en fuktig trasa.

Trots den solida konstruktionen och det hållbara materialet, utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras regelbundet (minst 1 gång per år) av en expert. Denna årliga översyn bör omfatta följande kontroller: Kontrollera visuellt alla delar av ramen för skador, slitage och korrosion, i synnerhet:

- ✓  Rollatorchassi
- ✓ Handtag och handtagsrör
- ✓ Bromshandtaget och bromskablarna
- ✓ Gafflar och länkhjul
- ✓ Bricka och korg
- ✓ Hjulens bromsfunktion
- ✓ Sätet och bromsmekanism
- ✓ Alla fästelement (t.ex. muttrar, bultar, nitar) kontrollera att de inte är sönder eller lösa.
- ✓ Kontrollera så att bromsfunktionen fungerar vid:
 - Bromsfunktion under färd
 - Låsning av hjulbroms vid parkering

6. Generella lösningar

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Rollatorn är svår att köra och styra.	Smuts mellan hjul och gafflar	Ta bort smuts eller hår mellan hjul och gaffel
Bromsarna fungerar inte.	Bromsbeläggen är slitna eller bromsarna är dåligt justerade	Kontrollera bromsinställningen - ändra möjligen bromsbelägg (→ Service Center)

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte kastas med hushållsavfall, utan måste föras till närmaste återvinningsstation.

8. Garanti

Mobilex A/S erbjuder en garanti på 2 år på alla produkter mot fel i material och utförande. Mobilex A/S ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig eller oprofessionell montering och/eller reparationer som orsakats av försummelse eller slitage, samt av förändringar av användaren eller tredje part. I dessa fall upphör CE-garantin och produktansvar att gälla.

Garantin omfattar inte transportkostnader och skadeståndskrav i samband med icke-användning av produkten under reparationstiden. Dessutom finns det ingen garanti för skador som uppstår i bristande överensstämmelse eller missförstånd av denna manual.

Vid upptäckt av material och produktionsfel, vänlig kontakta återförsäljaren omedelbart eller direkt till Mobilex A/S.

9. Deklaration om överensstämmelse (CE)

Företaget Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark deklarerar härmed, att produkten

"Jaguar" rollator för inomhusbruk - Art. Nr. 312410 och 312411

har utformats i enlighet med den tekniska dokumentationen och hantverk som uppfyller följande grundläggande krav:

- **Direktiv 93/42/EEG av EU-rådet**

Lars Nygaard
Direktör
Mobilex A/S

Skanderborg, 01.10.2016



underskrift