

## **Alligator SF ramper Montage og brugervejledning**



**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark  
www.mobilex.dk

## 1. Indledning

Kære kunde

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse. Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

### Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for udstyr til at overvinde forhindringer, såsom trin, med eller uden assistance af en hjælper. Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Denmark

Phone: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex.dk

## 2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet, specielt angivelsen af max. belastning.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med sammenklapning m.m er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag
- Ramperne må med assistance fra en hjælper maksimalt anvendes til forhindringer på:
  - SF-040: 10 cm**
  - SF-090 : 20 cm**
  - SF-120 : 25 cm**
  - SF-150: 30 cm**
- Ramperne må uden assistance fra en hjælper maksimalt anvendes til forhindringer på:
  - SF-045: 5 cm**
  - SF-090 : 10 cm**
  - SF-120 : 12 cm**
  - SF-150 : 15 cm**

## 3. Produktbeskrivelse


SF-Ramper er foldbare ramper lavet af aluminium. Overfladen har en specielt skridsikker belægning af Aluminium Silikat for at sikre mod at skride.

SF-Ramperne leveres i kartoner, der indeholder:

- ✓ 1 Rampe
- ✓ 1 Brugervejledning

### Transportbeskrivelse

SF-Ramperne kan foldes og bæres i et bærehåndtag. Sørg for at rampen er fastspændt under transport.

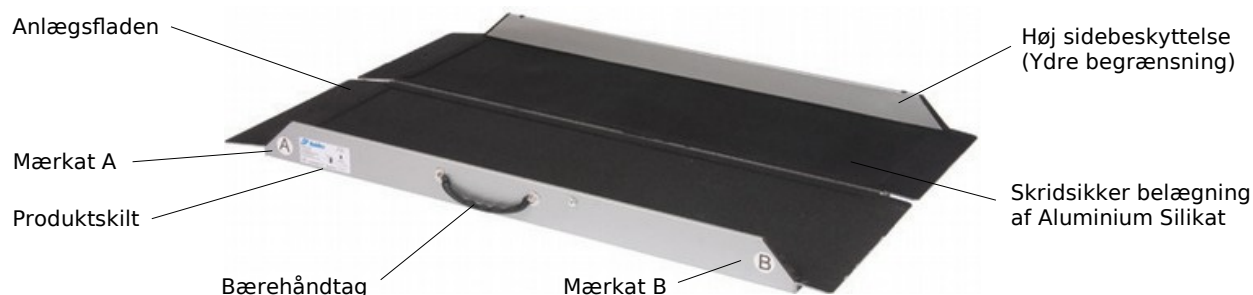

## Anvendelsesbeskrivelse

- SF-Rampen er forsynet med en mærkat **A** og en mærkat **B**
- Mærkat **A** kendetegner den øverste del af rampen, dvs. den side der placeres på hindringen
- Mærkat **B** kendetegner den nederste del af rampen dvs. den side der placeres på underlaget
- Enderne på ramperne skal placeres på et stabilt og lodret underlag
- Kontroller at ramperne står stabilt før der køres på dem

## Tilbehør


Der er ingen tilbehør til Alligator SF ramper.

## 4. Tekniske data

SC ramper	SF-040	SF-090	SF-120	SF-150
Længde	40 cm	90 cm	120 cm	150 cm
Bredde	71 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Køreflade bredde	71 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Højde sidebeskyttelse	--	6 cm	6 cm	6 cm
Max. stigning / højde	12° / 10 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
Vægt	4 kg	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Foldet mål cm (LxBxH)	45 x 37 x 5	90 x 40 x 10	120 x 40 x 10	150 x 40 x 10

## Produktskilt

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af produktet

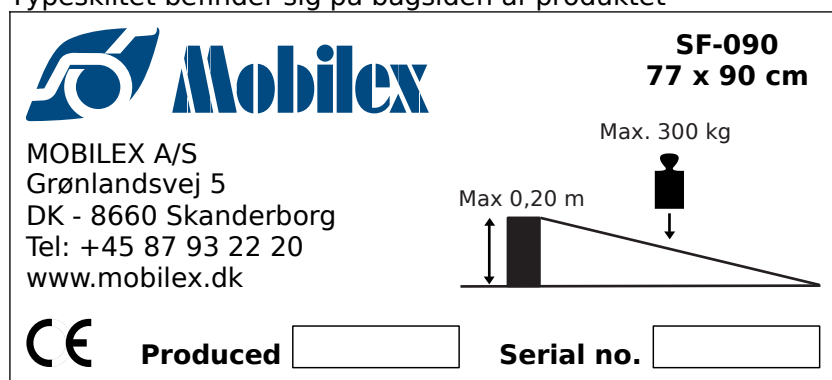

Billede af typeskiltet

## 5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.



**VIGTIGT:** Gummiprofilen som forbinder de to rampedele er en sliddel og skal kontrolleres for revner eller mørhed før hver brug. Det anbefales at udskifte gummiprofilen i tilfælde af fejl eller tvivl.

## 6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Rampen er ikke stabil	Underlaget er ikke stabilt	Kontroller rampens position. Flyt den til et stabilt underlag hvis muligt.
Rampen er ikke stabil	Rampen er monteret omvendt.	Kontroller at anlægsfladen ligger på forhindringen. Vend i givet fald rampen om.

## 7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## 9. Konformitetserklæring (CE)

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

### **Mobilex Alligator SF-Ramper**

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinalprodukter**

Lars Nygaard  
Adm. Direktør  
Mobilex A/S

Skanderborg, den 30-07-2009



.....  
Underskrift