

Mobilex TM-055, TM-150, TM-210 og TM-300 ramper

Montage- og brugervejledning



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Indledning

Kære kunde

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse. Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for udstyr til at overvinde forhindringer, såsom trin, med eller uden assistance af en hjælper. Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Indikation

Mobilex ramper finder anvendelse ved patienter, der pga. invaliditet sidder i kørestol. De gør det muligt for patienterne at overvinde højdeforskelle med eller uden bistand fra hjælper.

Kontraindikation

Der er ingen kendte kontraindikationer.

Ved spørgsmål bedes De henvende Dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk


2. Sikkerhed - Generelle henvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Sørg for, at denne brugervejledning bliver læst af alle personer der anvender rampen. Skader, der skyldes at brugervejledningen ikke er fulgt, vil ikke blive erstattet.
- Rampen må maksimalt anvendes ved stigninger på:
TM-150: 30 cm, TM-210: 40 cm, TM-300: 50 cm
- Benyt kun rampen til det formål, den er bestemt til.
- Anvend kun ramper, der er i teknisk god tilstand.
- Undlad at lave konstruktive ændringer på rampen, medmindre producenten skriftligt har godkendt dette.
- Når rampen anvendes skal brugeren være opmærksom på ikke at klemme fingre eller andet.
- Rampen må kun anvendes på et stabilt grundlag.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Mobilex ramper TM-serien er fremstillet af aluminium.

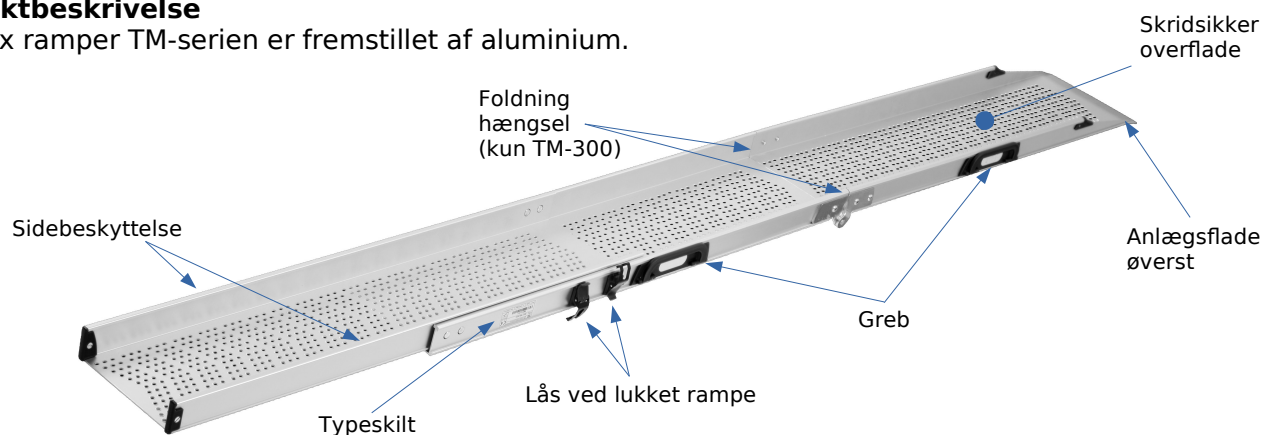

Leveringsomfang

Mobilex TM-ramper leveres monteret i kartoner. Indholdet består af:

- ✓ 2 separate køreskinner
- ✓ 1 brugsanvisning

Montage- og Funktionsbeskrivelse

- Model TM-150 og TM-210 er to-delte, model TM-300 har et ekstra element som er foldbar. I den foldede tilstand skal ramperne sikres med clip-lukning.
- Ramperne skal altid placeres parallelt
- Ramperne skal placeres så den skridsikre overflade vender opad.
- Ramperne skal placeres på et stabilt underlag.
- Check at rampen er stabil før den benyttes.

Transportbeskrivelse

Model TM-150 og TM-210 er to-delte og kan skubbes sammen og låses for transport (teleskopramper), model TM-300 har et ekstra element som er foldbar. Hav altid rampen låst under transport.

Optioner / tilbehør


For ramper af TM-serien intet yderligere tilbehør.

4. Tekniske data

TM Ramper	TM-055	TM-150	TM-210	TM-300
Længde	55 cm	150 cm	210 cm	300 cm
Bredde	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Kørefladebredde	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Sidebeskyttelse	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
Max. stigning / højdeforskel	12° / 11 cm	12° / 30 cm	12° / 40 cm	12° / 60 cm
Total vægt	2 x 1,45 kg	2 x 3,95 kg	2 x 5,8 kg	2 x 8,65 kg
Max. belastning	300 kg	300 kg	300 kg	250 kg
Foldet mål (L x B x H)	55 x 25 x 5,5 cm	98 x 25 x 6 cm	128 x 25 x 6 cm	108 x 26 x 13,5 cm
Bemærkning		Anvendes parvist	Anvendes parvist	Anvendes parvist

Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på ydersiden af rampen

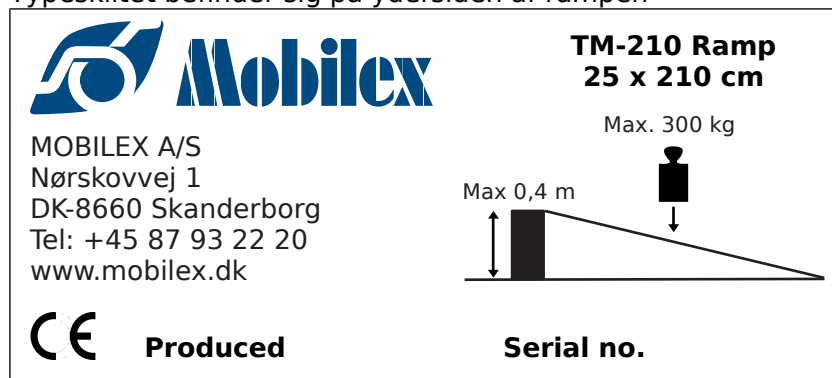

Billede af typeskiltet (ikke original)

5. Vedligeholdelse & Rengøring

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

- Lettere snavs og støv kan fjernes med en fugtig klud.
- Tungere former for snavs kan fjernes med et ikke-korroderende, mildt vaskemiddel.
- Du kan også bruge en haveslange til rengøring af rampen.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

6. De mest almindelige problemer og løsninger

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Rampen åbner sig ikke	Klik-låsen er ikke trykket ind	Tryk klik-låsen ind og lås fjedre og åben rampen
Rampen er ikke stabil	Underlaget under rampen er ikke jævnt.	Tjek rampens position og sæt den på en jævn overflade
Rampen er ikke stabil	Rampen er vendt med undersiden opad	Tjek om anlægsflade er øverst ved den forhindring der skal forceres.

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring (CE)

Mobilex A/S , Grønlandsvej 5 , 8660 Skanderborg, erklærer hermed, at produktet:

Mobilex rampe - TM serie

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinalprodukter**

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S

Skanderborg, den 11-04-2013


.....
Underskrift