

"Alligator" Ramper
TSR - Ramper
Montage- og brugervejledning



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Indledning

Kære kunde

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for udstyr til at overvinde forhindringer, såsom trin, med eller uden assistance af en hjælper. Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet, specielt angivelsen af max. belastning.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med sammenklapning m.m er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag
- Ramperne må **med** assistance fra en hjælper maksimalt anvendes til forhindringer på:
TSR-130 20 cm
TSR-140 20 cm
- Ramperne må **uden** assistance fra en hjælper maksimalt anvendes til forhindringer på:
TSR-130 13 cm
TSR-140 14 cm


3. Beskrivelse

Produkt beskrivelse

TSR-Ramper er foldbare ramper lavet af aluminium. Overfladen er specielt riflet for at sikre mod at skride. Ramperne består af en plade med klap samt 2 ben med justerbar højde.

SC-Ramperne leveres i kartoner, der indeholder:

- 1 Rampe
- 2 Ben
- 6 Hexagonale bolte
- 1 Brugervejledning

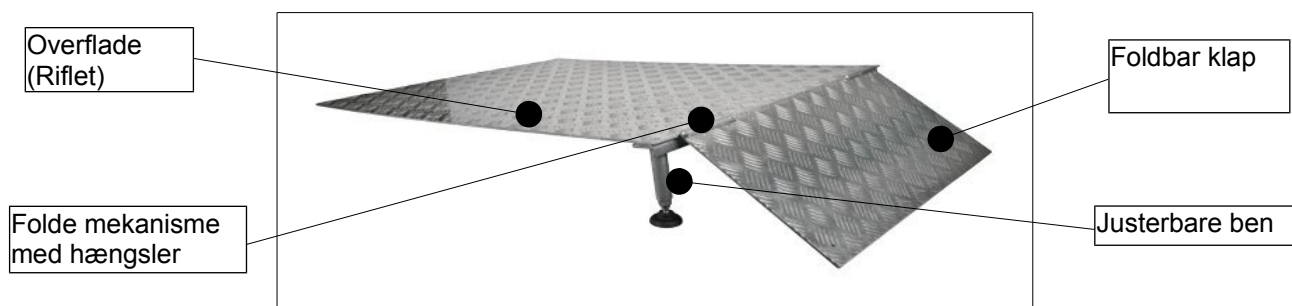

Monteringsanvisning

- Rampen leveres uden benene monteret
- Monter benene ved at skrue dem ind i rampens bagside med 3 bolte per ben.
- Juster benene så de passer med højden på forhindringen der skal overvindes. Det er vigtigt at benene justeres til samme højde. Højden skal være indstillet sådan at klappen kan gå hen over dørtrinnet og ned på gulvet på den anden side.
- Rampen skal placeres på et stabilt underlag.
- Kontroller at rampen ligger stabilt før der køres på den

Funktionsbeskrivelse

TSR-Ramperne er specielt udviklet til anvendelse ved fordøre, der åbner indad. Når døren åbnes kan klappen sænkes og gå ind over dørtrinnet og nå gulvet på den anden side. Når døren skal lukkes kan klappen lægges ned mod rampen igen. På bagsiden af klappen er monteret skridsikert materiale således at man kan lade rampen ligge og gå på den.

Transport beskrivelse

TSR-Ramperne egner sig ikke til transport. Benene kan skrues af for at mindske volumen. Sørg for at rampen er fastspændt under transport.

Tilbehør


TSR-Ramperne kan monteres med sidebeskyttelse (ekstra udstyr). Varenr. TK-125 for 125 cm lange kanter.

4. Tekniske data

TSR-Ramper	TSR-130	TSR-140
Total længde med åben klap	130 cm	140 cm
Total bredde	80 cm	80 cm
Bredde af klap	75 cm	75 cm
Længde af klap	30 cm	40 cm
Max. højde der kan overvindes	20 cm	20 cm
Vægt	14,70 kg	15,60 kg
Max. belastning	225 kg	225 kg
Højdejusteringsinterval	15 - 22,5 cm	15 - 22,5 cm

Produkt label

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af produktet

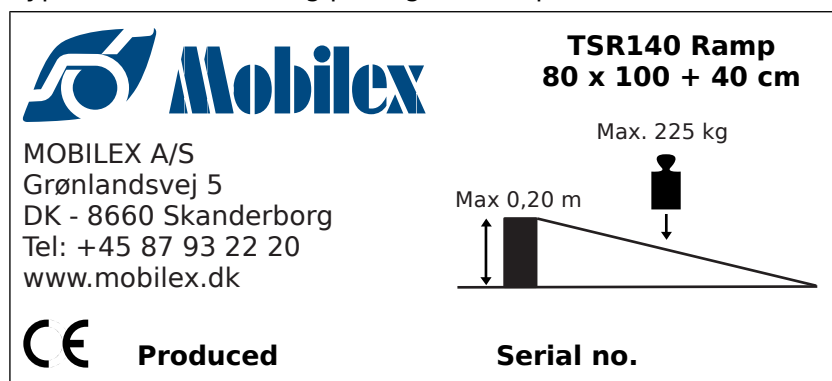

Billede af typeskiltet

5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Rampen er ikke stabil	Underlaget er ikke stabilt	Kontroller rampens position. Flyt den til et stabilt underlag hvis muligt.
Rampen er ikke stabil	Benene er ikke justeret i samme højde.	Kontroller om benene er justeret i samme højde. Juster benenes længde hvis nødvendigt

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

TSR-Ramper

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinalprodukter**

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S



Skanderborg, den 1.12.2012

.....
Underskrift